



Centro
Diagnostico
Veterinario

IL CORRETTO ALLESTIMENTO PER L'ESAME MICOLOGICO

1-Detergere la lesione con acqua e sapone e/o con alcool a 70°

2-Raccolta del materiale da esaminare :

a-Lesioni cutanee : prima di detergere tagliare i peli nel punto di prelievo e poi prelevare alcuni peli con una pinzetta ai margini della lesione

b-Lesioni eritemato-squamose : raschiare con un bisturi la parte più esterna della lesione

c-Lesioni vescicolose : prelevare con una forbicina ricurva i lembetti epidermici

d-Onicomicosi : asportare con forbici o tronchesino piccoli frammenti della lamina parassitata o raschiare con un coltellino la porzione ventrale della lamina ungueale

e-Mucose : eseguire il prelievo con un tampone